

＝ はじめにお読みください ＝

## 【検体採取チェック表】

◆検査キットはご注文日より**6ヶ月以内**に使用してください。

◆検体採取後は**（複数検体は一度にまとめて）**すみやかに返送をお願いします。

◆検査完了後は採り直しキット送付はできません。検査前は採り直しキットをお送りできますが、ローコストパッケージをご注文の場合は有料となります。

◆血液が検体の検査では、使用・未使用に関わらず全てのランセット（血液採取器具）と消毒綿は、お届けしております「医療廃棄物返送用袋」にてご返送ください。

◆「検査申込書お客様控」以外の**不要な書類**は、検体と一緒に返信用封筒に入れて返送いただければ、こちらで処分いたします。

検査を受ける時期

正確な検査結果を得るためにはある程度の経過日数が必要となる検査があります

検体の採取

効率よく・正しく採取できるように計画します

返送

複数の検査項目はまとめて返送します

順番	検査項目	検査を受ける時期	採取検体	検体採取のタイミング	チェック	返送の注意
	HIV抗体	感染が疑われる行為から、 <b>3ヶ月経過後</b>	血液	特になし		
	梅毒	感染が疑われる行為から、 <b>1-2ヶ月経過後</b>	血液	特になし		よく乾いた事を確認したら、速やかに。 アルコール綿は検体と同封しない。
	B型肝炎	感染が疑われる行為から、 <b>2-3ヶ月経過後</b>	血液	特になし		
	C型肝炎	感染が疑われる行為から、 <b>3ヶ月経過後</b>	血液	特になし		
	性器淋菌	感染が疑われる行為から、 <b>1-2日後</b> <small>（治療確認の検査の場合） 投薬完了後、1-2週間程度開けてから検査を受ける</small>	尿	起床後の初尿(出始めの尿) 【上記で採取できなかった場合】最後の排尿後から2～3時間経過後の初尿でも可		なるべく当日中
	性器クラミジア	感染が疑われる行為から、 <b>1-2日後</b> <small>（治療確認の検査の場合） 投薬完了後、1-2週間程度開けてから検査を受ける</small>	尿	起床後の初尿(出始めの尿) 【上記で採取できなかった場合】最後の排尿後から2～3時間経過後の初尿でも可		なるべく当日中
	トリコモナスDNA	感染が疑われる行為から、 <b>1-2日後</b> <small>（治療確認の検査の場合） 投薬完了後、1-2週間程度開けてから検査を受ける</small>	尿	起床後の初尿(出始めの尿) 【上記で採取できなかった場合】最後の排尿後から2～3時間経過後の初尿でも可		なるべく当日中
	カンジダ	随時検査可能	陰茎表皮擦過物	入浴前		なるべく当日中
	のど(咽頭)淋菌	感染が疑われる行為から、 <b>1-2日後</b> <small>（治療確認の検査の場合） 投薬完了後、1-2週間程度開けてから検査を受ける</small>	うがい液	起床後、飲食やうがい・歯磨きの前に採取 【上記で採取できなかった場合】最後の飲食後やうがいから1～2時間経過後でも可		なるべく当日中
	のど(咽頭)クラミジア	感染が疑われる行為から、 <b>1-2日後</b> <small>（治療確認の検査の場合） 投薬完了後、1-2週間程度開けてから検査を受ける</small>	うがい液	起床後、飲食やうがい・歯磨きの前に採取 【上記で採取できなかった場合】最後の飲食後やうがいから1～2時間経過後でも可		なるべく当日中
	大腸がん	随時検査可能	便(2日分)	連続した2日間 【連続で採取できなかった場合】1回目から4日以内に2回目の便を採取(その間は冷蔵保管)		冷暗所に保管し クール宅配便で速やかに
	胃がん予防	随時検査可能	便	特になし		冷暗所に保管し クール宅配便で速やかに
	肺がん	随時検査可能	喀痰(3日分)	起床後の連続した3日間 【上記で採取できなかった場合】出やすい時間帯での採取でも可		なるべく当日中

### ＜女性＞

順番	検査項目	検査を受ける時期	採取検体	検体採取のタイミング	チェック	返送の注意
	HIV抗体	感染が疑われる行為から、 <b>3ヶ月経過後</b>	血液	特になし		
	梅毒	感染が疑われる行為から、 <b>1-2ヶ月経過後</b>	血液	特になし		よく乾いた事を確認したら、速やかに。 アルコール綿は検体と同封しない。
	B型肝炎	感染が疑われる行為から、 <b>2-3ヶ月経過後</b>	血液	特になし		
	C型肝炎	感染が疑われる行為から、 <b>3ヶ月経過後</b>	血液	特になし		
	性器淋菌	感染が疑われる行為から、 <b>1-2日後</b> <small>（治療確認の検査の場合） 投薬完了後、1-2週間程度開けてから検査を受ける</small>	膣分泌物	生理中でなく、直前に性交や洗浄してなく、薬を塗ってない時		なるべく当日中
	性器クラミジア	感染が疑われる行為から、 <b>1-2日後</b> <small>（治療確認の検査の場合） 投薬完了後、1-2週間程度開けてから検査を受ける</small>	膣分泌物	生理中でなく、直前に性交や洗浄してなく、薬を塗ってない時		なるべく当日中
	トリコモナスDNA	感染が疑われる行為から、 <b>1-2日後</b> <small>（治療確認の検査の場合） 投薬完了後、1-2週間程度開けてから検査を受ける</small>	膣分泌物	生理中でなく、直前に性交や洗浄してなく、薬を塗ってない時		なるべく当日中
	カンジダ	随時検査可能	膣分泌物	生理中でなく、直前に性交や洗浄してなく、薬を塗ってない時		なるべく当日中
	のど(咽頭)淋菌	感染が疑われる行為から、 <b>1-2日後</b> <small>（治療確認の検査の場合） 投薬完了後、1-2週間程度開けてから検査を受ける</small>	うがい液	起床後、飲食やうがい・歯磨きの前に採取 【上記で採取できなかった場合】最後の飲食後やうがいから1～2時間経過後でも可		なるべく当日中
	のど(咽頭)クラミジア	感染が疑われる行為から、 <b>1-2日後</b> <small>（治療確認の検査の場合） 投薬完了後、1-2週間程度開けてから検査を受ける</small>	うがい液	起床後、飲食やうがい・歯磨きの前に採取 【上記で採取できなかった場合】最後の飲食後やうがいから1～2時間経過後でも可		なるべく当日中
	HPV	随時検査可能	膣分泌物	生理中でなく、直前に性交や洗浄してなく、薬を塗ってない時		なるべく当日中
	子宮頸がん	随時検査可能	子宮頸部擦過物	妊娠中・生理中でなく、直前に性交や洗浄してなく、入浴前		なるべく当日中
	大腸がん	随時検査可能	便(2日分)	生理中でない連続した2日間 【連続で採取できなかった場合】1回目から4日以内に2回目の便を採取(その間は冷蔵保管)		冷暗所に保管し クール宅配便で速やかに
	胃がん予防	随時検査可能	便	特になし		冷暗所に保管し クール宅配便で速やかに
	肺がん	随時検査可能	喀痰(3日分)	起床後の連続した3日間 【上記で採取できなかった場合】出やすい時間帯での採取でも可		なるべく当日中