

【検体採取チェック表】



正確な検査結果を得るためにはある程度の経過日数が必要となる検査があります
 効率よく・正しく採取できるように計画します
 複数の検査項目はまとめて返送します

= はじめにお読みください =

- ◆検体採取キットはご注文日より**6ヶ月以内**に使用してください。
- ◆検体採取後は(複数検体は一度にまとめて)すみやかに返送をお願いします。

＜男性＞

チェック	検査項目	検査を受ける時期	採取検体	検体採取のタイミング	返送の注意
	B型肝炎	感染が疑われる行為から、 2-3ヶ月経過後	血液	特になし	よく乾いた事を確認したら、速やかに。 アルコール綿は検体と同封しない。
	C型肝炎	感染が疑われる行為から、 3ヶ月経過後	血液	特になし	
	HIV	感染が疑われる行為から、 1ヶ月経過後 ※1	血液	特になし	
	梅毒	感染が疑われる行為から、 1ヶ月経過後 ※1	血液	特になし	
	性器クラミジア	感染が疑われる行為から、 1日経過後 ※2	尿	起床後の初尿(出始めの尿) 【採取できなかった場合】最後の排尿後から2～3時間経過後の初尿でも可	なるべく当日中
	性器淋菌	感染が疑われる行為から、 1日経過後 ※2	尿	起床後の初尿(出始めの尿) 【採取できなかった場合】最後の排尿後から2～3時間経過後の初尿でも可	なるべく当日中
	トリコモナス	感染が疑われる行為から、 1日経過後 ※2	尿	起床後の初尿(出始めの尿) 【採取できなかった場合】最後の排尿後から2～3時間経過後の初尿でも可	なるべく当日中
	カンジダ	随時検査可能	陰茎表皮擦過物	直前に性交していない、入浴前	なるべく当日中
	直腸肛門クラミジア	感染が疑われる行為から、 1日経過後 ※2	直腸擦過物	直前に排便や性交、洗浄をしていない時	なるべく当日中
	直腸肛門淋菌	感染が疑われる行為から、 1日経過後 ※2	直腸擦過物	直前に排便や性交、洗浄をしていない時	なるべく当日中
	のど(咽頭)クラミジア	感染が疑われる行為から、 1日経過後 ※2	うがい液	起床後、飲食やうがい・歯磨きの前に採取 【採取できなかった場合】最後の飲食後やうがいから1～2時間経過後でも可	なるべく当日中
	のど(咽頭)淋菌	感染が疑われる行為から、 1日経過後 ※2	うがい液	起床後、飲食やうがい・歯磨きの前に採取 【採取できなかった場合】最後の飲食後やうがいから1～2時間経過後でも可	なるべく当日中
	胃がん予防	随時検査可能	便	特になし	冷蔵所に保管し、保冷返送(送料当社負担)で速やかに
	肺がん	随時検査可能	喀痰(3日分)	起床後の連続した3日間 【採取できなかった場合】出やすい時間帯で1週間以内で3日分の採取でも可	なるべく当日中
	大腸がん	随時検査可能	便(2日分)	連続した2日間 【連続で採取できなかった場合】1回目から4日以内に2回目の便を採取(その間は冷蔵保管)	冷蔵所に保管し、保冷返送(送料当社負担)で速やかに

※1: 真の陰性確認は3ヶ月経過後 ※2: 治療確認の場合は、「治療後2週間」のち

＜女性＞

チェック	検査項目	検査を受ける時期	採取検体	検体採取のタイミング	返送の注意
	B型肝炎	感染が疑われる行為から、 2-3ヶ月経過後	血液	特になし	よく乾いた事を確認したら、速やかに。 アルコール綿は検体と同封しない。
	C型肝炎	感染が疑われる行為から、 3ヶ月経過後	血液	特になし	
	HIV	感染が疑われる行為から、 1ヶ月経過後 ※1	血液	特になし	
	梅毒	感染が疑われる行為から、 1ヶ月経過後 ※1	血液	特になし	
	性器クラミジア	感染が疑われる行為から、 1日経過後 ※2	膣分泌物	生理中でなく、直前に性交や洗浄してなく、薬を塗ってない時	検査液は捨てない なるべく当日中
	性器淋菌	感染が疑われる行為から、 1日経過後 ※2	膣分泌物	生理中でなく、直前に性交や洗浄してなく、薬を塗ってない時	なるべく当日中
	トリコモナス	感染が疑われる行為から、 1日経過後 ※2	膣分泌物	生理中でなく、直前に性交や洗浄してなく、薬を塗ってない時	なるべく当日中
	カンジダ	随時検査可能	膣分泌物	生理中でなく、直前に性交や洗浄してなく、薬を塗ってない時	なるべく当日中
	直腸肛門クラミジア	感染が疑われる行為から、 1日経過後 ※2	直腸擦過物	直前に排便や性交、洗浄をしていない時	なるべく当日中
	直腸肛門淋菌	感染が疑われる行為から、 1日経過後 ※2	直腸擦過物	直前に排便や性交、洗浄をしていない時	なるべく当日中
	のど(咽頭)クラミジア	感染が疑われる行為から、 1日経過後 ※2	うがい液	起床後、飲食やうがい・歯磨きの前に採取 【採取できなかった場合】最後の飲食後やうがいから1～2時間経過後でも可	なるべく当日中
	のど(咽頭)淋菌	感染が疑われる行為から、 1日経過後 ※2	うがい液	起床後、飲食やうがい・歯磨きの前に採取 【採取できなかった場合】最後の飲食後やうがいから1～2時間経過後でも可	なるべく当日中
	HPV	随時検査可能	膣分泌物	生理中でなく、直前に性交や洗浄してなく、薬を塗ってない時	なるべく当日中
	子宮頸がん	随時検査可能	子宮頸部擦過物	妊娠中・生理中でなく、直前に性交や洗浄してなく、入浴前	なるべく当日中
	胃がん予防	随時検査可能	便	特になし	冷蔵所に保管し、保冷返送(送料当社負担)で速やかに
	肺がん	随時検査可能	喀痰(3日分)	起床後の連続した3日間 【採取できなかった場合】出やすい時間帯で1週間以内で3日分の採取でも可	なるべく当日中
	大腸がん	随時検査可能	便(2日分)	生理中でない連続した2日間 【連続で採取できなかった場合】1回目から4日以内に2回目の便を採取(その間は冷蔵保管)	冷蔵所に保管し、保冷返送(送料当社負担)で速やかに

※1: 真の陰性確認は3ヶ月経過後 ※2: 治療確認の場合は、「治療後2週間」のち