

採取方法説明書

うがい液を採取します。

重要


- ・起床後すぐに飲食をしないで採取してください。
- ※起床後に採取できなかった場合、飲食や最後のうがいから1～2時間程度空けてから採取してください。
- ・容器内の検査液は捨てないでください。

注意! 容器内の検査液では、うがいをしないでください

1

容器を袋から取り出し、
検査申込番号シールを容器に貼って
ください。

※検査申込番号シールは、別紙の
「取扱説明書」に付属されています。

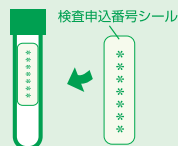

2

コップを組み立てます。15ml程度の水で、「ガラガラ」と勢いよく約10秒うがいます。

うがい液をコップに吐き出し、スポイト
でうがい液を吸い上げてください。

※うがいに用いる水は、水道水をご使用ください。
※容器内の検査液ではうがいをしないでください。



コップの底から1cmくらいの
量が、15mlです。

3

スポイトから容器へ量に
注意しながら、ゆっくりう
がい液を移します。
採取量は右図をご確認く
ださい。

※スポイトいっぱいに入ると
溢れる場合がございます。

検体採取量の目安

上下の線の間
が目安となります。

※検査液の濃度が適切でないと検査で
きない場合があります。下の線より少
ない。もしくは上の線より多く入れて
しまわないようにしてください。



4

容器の黄色いふたを閉め、
「うがい液採取容器返送袋」に入れてください。

注意 ふたをしっかりと閉め、採取当日中にご返送ください。

