

ワイブチェック GME-W 届出番号 09B3X00006000027

ちつ

膣分泌液を採取する

- ・生理中の採取は避けてください。
- ・膣内を綿棒で強くこすったり、綿棒が曲がるほど強い力を入れないでください。
- ・検体採取後はお早めにご返送ください。

1

容器を袋から取り出し、検査申込番号のシールを容器に貼ってください。

※検査申込番号シールは、別紙の「取扱説明書」に付属されています。

注意

手を清潔に！
綿球には触れない！

検査申込番号シール



容器


2

綿棒を容器から取り出し、膣分泌液を採取してください。

キャップを右図のように持ち、膣口を開きながら綿棒を膣部に3～4cm挿入する。
綿棒を7～8回、回転させながら分泌液を拭い取る。

注意

粘膜を傷つけないよう注意して
軽く採取してください。

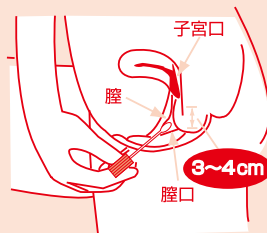

3

綿棒を容器にいれ、キャップを閉めて、「膣綿棒専用 返送袋」に入れてください。

キャップとチャック付き袋をしっかりと閉めてください。

綿棒付きキャップ

容器

