

正しい 大便の とり方

※必ず、説明書を読んで
から採便してください


注意事項

- アルミシールは、やぶらないでください。
- 1本の容器に、2日分とらないでください。
- 1日目と2日目の採便間隔はできるだけ短くしてください。
- 容器の液を捨てたり飲んだり、水を足したりしないでください。
- 生理中は、採便をしないでください。
- 人体に直接使用しないでください。
- 大便をとる目的以外には使用しないでください。
- 保管は、子どもの手の届かない所にしてください。
- 自動洗浄機能の作動に注意して採便してください。

この説明書はトイレに流すことはできません

1

ラベルに
氏名等を記入

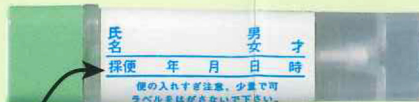

※必ず、採便した日・時を記入
してください
※水性ペンは避けてください



① キャップを
回して、
② 引きぬく

2

※便をとるすぎると、正しい検査ができません



とる量

みぞ

先端のみぞに埋まるくらい

3

① キャップと容器の向きを
合わせて、さし込む



② まっすぐ強く押す
※回し入れないでください



1日目
青字ラベル

2日目
赤字ラベル



※採便後は冷暗所で
保存

提出用袋に2本入れ
すぐに提出

(和式)



(洋式)



正しく検査をして
いつも健康で
いようネ