

採取方法説明書

尿を採取する

- ・起床後の出始めの尿（初尿）を採取してください。

※ 起床後に採取できなかった場合、最後の排尿から2～3時間経過してから出始めの尿(初尿)を採取していただければ問題ありません。

1

容器を袋から取り出し、
検査申込番号シールを容器に貼っ
てください。

※検査申込番号シールは、別紙の
「取扱説明書」に付属されています。




検査申込番号シール



2

尿コップを組み立てます。尿コップに尿をとり、
採尿容器をスポイトのようにして尿を吸い上げて
ください。

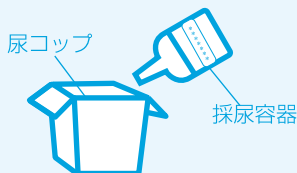

採尿器を押して中の空気を出し
てからコップの尿を吸入する。

注意

できるだけ採尿容器の線のところまで尿を入れてください。

3

採尿容器の赤いふたを閉め、チャック付の袋に
入れてから「尿専用 返送袋」に
入れてください。

注意

容器のふたは、しっかりとしめて、
採取当日中にご返送ください。

