

(直腸)クラミジア・淋菌検体採取セット 採取方法説明書

※お子様の手の届かない所に保管してください。


【ご使用上の注意】～安全にお使いいただくために～

容器内の液体について

- 液を捨てたり、こぼさないようご注意ください。
- 液を飲まないでください。また口に含まないでください。
- 液が皮膚や目に触れた場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
(必要があれば医師の手当てを受けてください。)
- 液をこぼした場合、ビニール手袋やゴム手袋を着用して直接液体に触れないように拭き取ってください。

綿棒について

- 綿球が細い綿棒は、採取に失敗した時の予備です。**(※綿球が大きく丸く膨らんだ綿棒を使用します。)**
- 検体を採取する前に、綿棒を容器内の液体に浸さないでください。
- 付属の綿棒以外は使用しないでください。
- 中央付近の黒線の所で折れやすくなっていますので、検体採取前や検体採取中に強い力を加えないでください。
- 綿球部分の繊維は、腸内に万が一残ったとしても、人体に害はございません。
- 綿球部分が黄色くなっている物もございますが、品質上・検査精度上問題はございません。
- 綿棒はすべて、滅菌処理を行っております。安心してご使用ください。

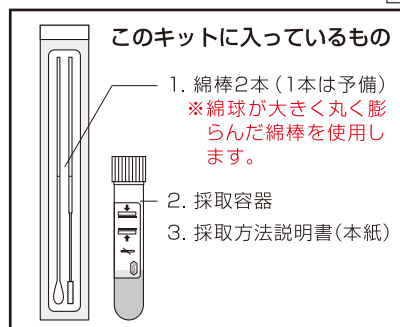

採取上の注意 ～大切です!!～

- 容器内の液体に浸した綿棒は絶対に検体採取に使用しないでください。
- 無理な力を入れて採取を行わないでください。粘膜を傷つける恐れがあります。また、綿棒が腸内で折れる恐れがあります。
- 容器内には採取した付属の綿棒だけを入れてください。
- 採取した綿棒は速やかに容器の液体の中へ入れてください。
- 排便及び、性行為直後の採取は避けてください。

【検体採取の方法】

