

たんの容器袋

採痰方法(裏面)をよく読んで下さい。

検診者とご家族の方は必ず下記の注意事項をお読み下さい。

取り扱い注意事項

- 中の液は人体に無害な物質ですが、絶対に飲まないで下さい。誤って飲み込んだ場合は多量の水を飲ませた後、指をのどに差し込んで吐き出させ、直ちに医師の手当を受けて下さい。
- 可燃性の物質が含まれていますので、火気のある場所及び30℃以上の場所に置かないで下さい。
- 冷暗所に保管して下さい。
- 冷蔵庫は保存液が固まり結晶になる可能性がありますので、避けて下さい。
- 小さなお子様の手の届かない場所に保管して下さい。
- 採痰後(3日分)は速やかに提出して下さい。

株式会社ピーシーエルジャパン(BMLグループ)


製造元 武藤化学株式会社



採痰方法



痰を出すには早朝が一番です。朝食や歯みがきの前に痰を出して下さい。口をきれいにするために2~3回水で口をゆすいでおいて下さい。

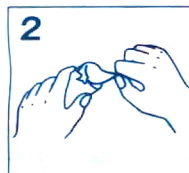


キャップを開けて、アルミシールをきれいに全部はがして捨てして下さい。(注)破片が残っていると液がもれる事があります。



2~3回深呼吸を、2~3回せきばらいをしてから痰を出して下さい。この時出る痰を採痰容器にできるだけツバを入れないようにして吐き出して下さい。



痰を入れたら、キャップをしっかり閉めて、左図のように容器をもって、20回程度強く振って痰を溶かして下さい。

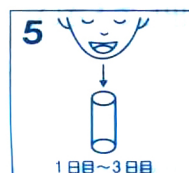

3日分の痰を3、4と同様の手順で、同じ容器に入れて下さい。痰が出ない時は、数日をかけて3日分を入れて下さい。

痰を集め終わったら容器に「氏名」と「採痰日」を必ず記入して下さい。