


ヘリコバクター・ピロリ検査のための 正しい便のとり方

正確な検査を行うために必ずお読み下さい。

- お取扱上の注意**
- 便が古くなると正しい結果が得られないので、出来るだけ**新しい便**を提出して下さい。
 - 採便後の採便容器は、冷暗所に保管して下さい。
 - 便をとる目的以外には使用しないで下さい。
 - 子供の手が届かない所に保管して下さい。
 - 採便棒を肛門に差し込まないようにして下さい。
 - 水洗水が付かないように便をとって下さい。
 - 採便容器の緑キャップは、**絶対はずしたり、ゆるめたりしないで下さい。**
 - 採便容器には防腐剤が含まれています。
誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には水で十分に洗い流す等の応急処置を行い
必要があれば医師の手当て等を受けて下さい。
 - 採便棒を容器に戻してねじ込む際には、手に刺したり指等を挟まないようにして下さい。

1 準備

容器の白ラベルを途中まではがし氏名・日付等を記入し、また巻いて下さい。
ピンクの採便棒を回して引き抜いて下さい。

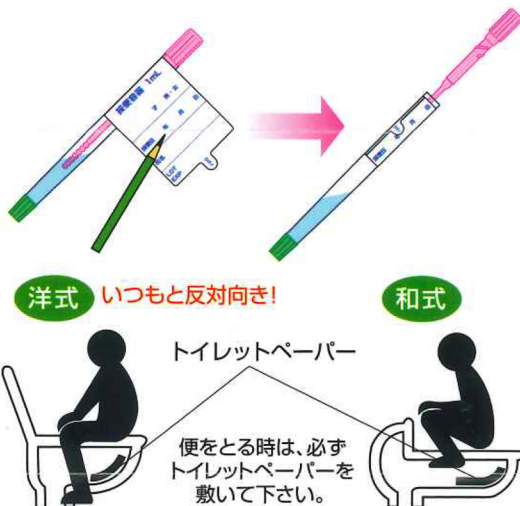


保管上の注意

- 添付のビニール袋に入れて提出まで冷暗所に保管して下さい。
- 採便後は、すみやかに提出して下さい。

2 便をとる

採便棒先端の**溝すべて**が便でうまるように、
便の表面をこすり取って下さい。

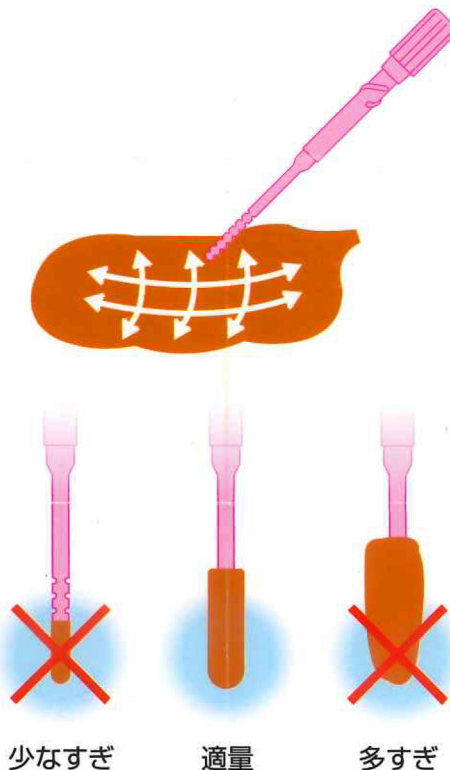

3 便をとったあと

採便棒を容器にもどして根元までしっかり
ねじ込んで下さい。

