

陰茎表皮擦過物を採取する

- ・ 性行為・入浴直後の採取はお避けください。
- ・ 手をきれいに洗った後に採取してください。
- ・ 綿棒は先端部分を手で触ったり、陰茎以外のものに触れることがないようにしてください。
- ・ 検体採取後はお早めにご返送ください。


1

容器を袋から取り出し、
検査申込番号シールを容器に貼ってください。

※検査申込番号シールは、別紙の
「取扱説明書」に付属されています。


注意

手を清潔に！
綿球には触れない！

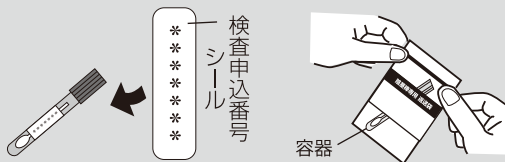

2

綿棒を容器から取り出し、陰茎全体をめぐってください。
特に皮膚の重なっている部分や冠状溝を丁寧にめぐってください。

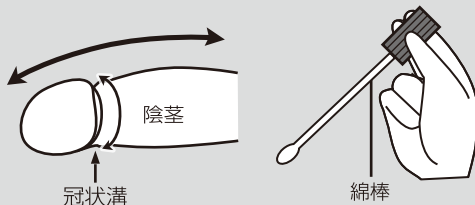

3

綿棒を容器に入れ、キャップを閉めて、
「陰茎専用 返送袋」に入れてください。

キャップとチャック付き袋を
しっかり閉めてください。

